

**Adjuvant dans le traitement d'infections vaginales d'origine bactérienne, mycosique (ex : candidose) et virale (ex : verrues génitales) et dans la prévention des récurrences de l'herpès simplex de type 2 (HSV-2).**

**Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation.**



## PROPRIÉTÉS

- Le Dispositif médical Suvégel® Ionic est une formulation en capsule à dissolution rapide. Il contient plusieurs composants qui, grâce à leurs propriétés, vont former une barrière protectrice en complément du traitement des infections vaginales bactériennes, fongiques et virales. Les tissus sont donc isolés et protégés des facteurs irritants externes ce qui favorise le maintien et la restauration des conditions physiologiques normales.
- Suvégel® Ionic possède une double action : Il protège la zone d'application des agressions microbiennes externes ; Il limite la colonisation microbienne au niveau de la zone d'application, créant ainsi des conditions optimales pour permettre la régénération tissulaire.

## COMPOSITION

TIAB (microcristaux à base d'ions argent), hyaluronate de sodium, extrait d'Aloe Vera (Aloe barbadensis), triglycéride caprylique/caprique, Peg-6 stéarate (et) stéarate de glycol (et) PEG-32 stéarate, stéarate de glycérile.

## CONSEIL D'UTILISATION

Avant utilisation, nettoyez soigneusement la zone intime. Insérez profondément la capsule dans le vagin. Répétez la procédure d'application une fois par jour pendant sept jours. Le dispositif médical doit être utilisé dès l'apparition des premiers symptômes (démangeaisons, brûlures, gêne, etc.) ou avant qu'ils ne se manifestent. Il n'est pas nécessaire de respecter une période d'arrêt après le traitement de 7 jours.

## MENTIONS LÉGALES

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Boîte de 10 capsules

Code EAN 3770008240704

•

Dispositif médical de classe IIb

Numéro de marquage CE : 0477

Fabricant: NTC srl